


ULTRASSOM ODONTOLÓGICO

PROFI NEO

- 1- Peça de mão de bicarbonato de sódio
- 2- Peça de mão de ultrassom
- 3- Painel de controle
- 4- Chave de liga/desliga e seleção das funções ultrassom e jato de bicarbonato de sódio
- 5- Chave seletora de potência de ultrassom
- 6- Faixa laranja indicadora do limite de potência recomendado para Tips Endo.
- 7- Faixa laranja+marrom indicadores do limite de potência Tips Perio.
- 8- Chave da bomba peristáltica (liga/desliga) e controle de vazão do líquido.

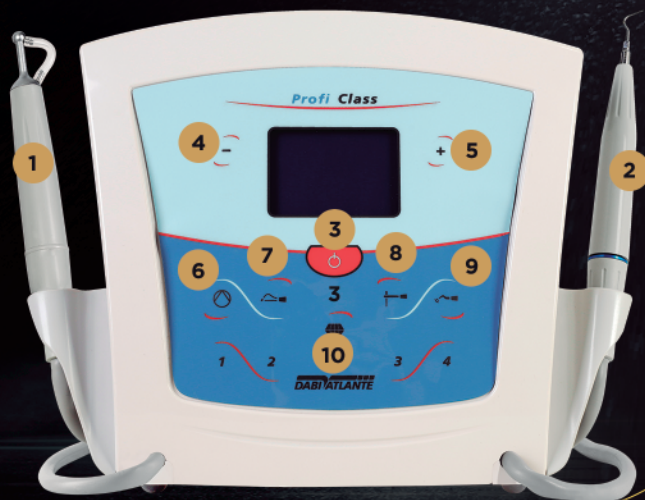

PROFI CLASS

- 1- Peça de mão de bicarbonato de sódio
- 2- Peça de mão de ultrassom
- 3- Painel de controle
- 4- Tecla -
- 5- Tecla +
- 6- Bomba peristáltica
- 7- Jato de bicarbonato
- 8- Ultrassom Endo
- 9- Ultrassom Perio
- 10- Dentística

O QUE É O ULTRASSOM?

Gerador de onda ultrassônica (com freqüência entre 24000 e 30000 Hz) que através de um transdutor, utilizando pastilhas cerâmicas, transmite a instrumentos ativos, vibração mecânica na mesma frequência e que auxiliam o cirurgião dentista em várias práticas odontológicas, tais como: periodontia, endodontia, prótese, cirurgia e outros.

O QUE É O JATO DE BICARBONATO?

É uma mistura pressurizada de ar, água e bicarbonato de sódio, conduzida através de dutos até o bico da peça de mão, onde forma um jato uniforme utilizado para remoção da placa bacteriana, matéria alba e manchas dentais.

- O ultrassom odontológico é utilizado para remoção de biofilme mineralizado ou para tratamento endodôntico, possui também jato de bicarbonato para remoção de biofilme desmineralizado.
- Acompanha 2 tips Perio Sub e 1 Perio Supra e Chave Universal.
- Corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho
- Contém: unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido, LED que indica que o aparelho está energizado, chave seletora do ultrassom ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultrassom regulável em sete estágios que permite mais ou menos potência e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica.



PERIO SUB

Pontas indicadas para remoção de cálculo dental sub gengival.



PERIO SUPRA

Pontas indicadas para remoção de cálculo dental em todas as superfícies supra gengivais, principalmente em dentes posteriores.



PERIO E

Remoção de tártaro nas faces vestibulares, linguais ou cervicais dos dentes anteriores.



REMO C

Auxilia a remoção de coroas protéticas e provisórias.



REMO N

Indicados para auxiliar na remoção de núcleos metálicos.



ENDO G

Auxilia na obturação dos canais radiculares, plastificação de guta percha e abertura de espaço lateral.



ENDO L

Auxiliar na instrumentação, irrigação dos canais radiculares e remoção de corpos estranhos.

Fotos Ilustrativas. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. Ultrassom Odontológico: Anvisa 10101330067. Tips: Anvisa 10101339031. 51000000161: Versão - Fev/2022.

SOLICITE ORÇAMENTO



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante

DABI ATLANTE